

ANIOSYME X3

Détergent
pré-désinfectant
de l'instrumentation

PRODUIT
A DILUER
25 ml > 5L




0,5%
5 min.



INDICATIONS

Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel d'endoscopie. Ramassage de l'instrumentation souillée. Nettoyage en bacs à ultrasons.

PROTOCOLE D'UTILISATION INSTRUMENTATION

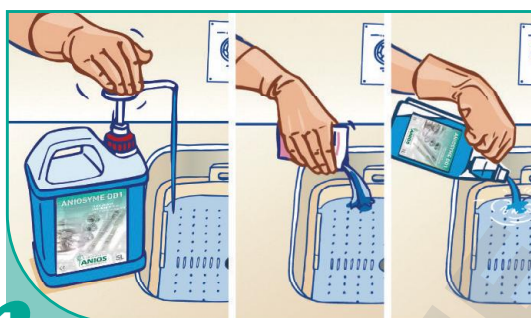

1

Dilution à 0,5 % : Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède.



2

5 min.

Immerger complètement le dispositif médical. Temps de trempage : **5 minutes minimum**. Brosser, écouvillonner si nécessaire.



3

Rincer soigneusement et abondamment à l'eau de réseau.

- ▶ **Matériel thermosensible :**
Passer à l'étape suivante (voir procédure interne à l'établissement)
- ▶ **Matériel autoclavable :**
Sécher soigneusement à l'aide d'un champ propre et passer à l'étape suivante (voir procédure interne à l'établissement)

Dangereux - respectez les précautions d'emploi.