

# ANIOSYME X3

Détergent  
pré-désinfectant  
de l'instrumentation

PRODUIT  
A DILUER  
25 ml > 5L




0,5%  
5 min.



## INDICATIONS


Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel d'endoscopie. Ramassage de l'instrumentation souillée. Nettoyage en bacs à ultrasons.

## PROTOCOLE D'UTILISATION INSTRUMENTATION

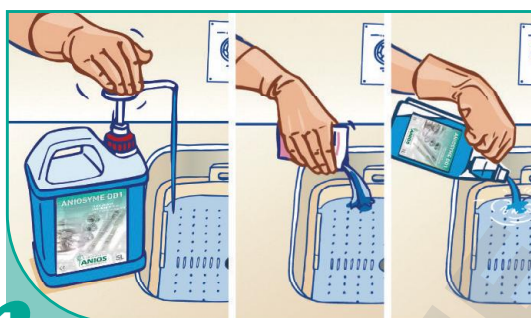

1


**Dilution à 0,5 % :** Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède.

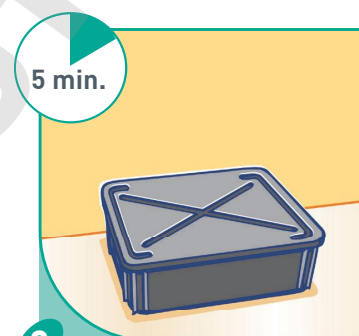

5 min.

2

Immerger complètement le dispositif médical. Temps de trempage : **5 minutes minimum**. Brosser, écouvillonner si nécessaire.

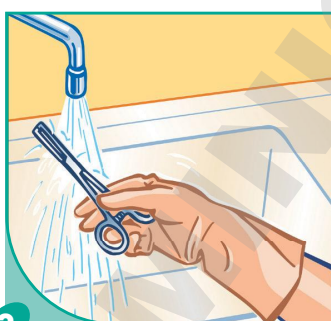

3

Rincer soigneusement et abondamment à l'eau de réseau.

- ▶ **Matériel thermosensible :**  
Passer à l'étape suivante (voir procédure interne à l'établissement)
- ▶ **Matériel autoclavable :**  
Sécher soigneusement à l'aide d'un champ propre et passer à l'étape suivante (voir procédure interne à l'établissement)

Dangereux - respectez les précautions d'emploi.