


ANIOS'CLEAN EXCEL D

Détergent
pré-désinfectant
de l'instrumentation

PRODUIT
A DILUER
25 ml > 5L

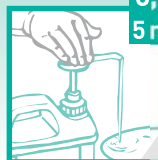


0,5%
5 min.



INDICATIONS


Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation.

PROTOCOLE D'UTILISATION INSTRUMENTATION

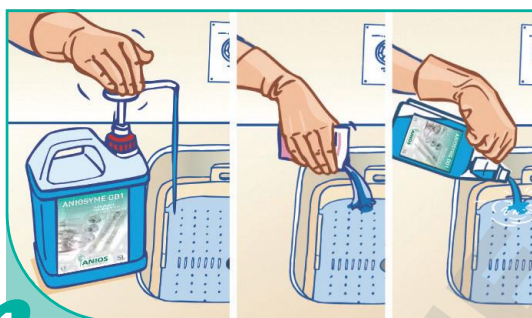

1

Dilution à 0,5 % : Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède.

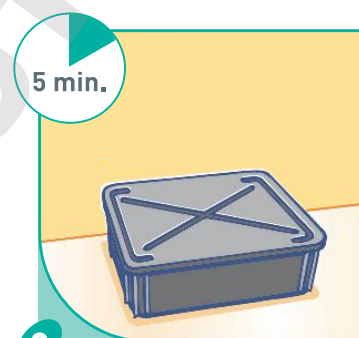

5 min.

2

Immerger complètement le dispositif médical. Temps de trempage : **5 minutes minimum**. Brosser, écouvillonner si présence de souillures apparentes.



3

Rincer abondamment les dispositifs médicaux traités à l'eau de réseau (de bonne qualité pour microbiologique) éliminer toute trace de produit et souillure organique.

- **Matériel thermosensible :**
Passer à l'étape suivante (voir procédure interne à l'établissement)
- **Matériel autoclavable :**
Sécher soigneusement à l'aide d'un champ propre et passer à l'étape suivante (voir procédure interne à l'établissement)

Dangereux - respectez les précautions d'emploi.