



## Fiche technique

# 3M™ Comply™ 1322

Ruban indicateur pour stérilisation à la vapeur

### Proximité

- Encre indicatrice sans plomb
- L'adhésif du ruban 3M Comply 1322 est conçu pour être utilisé sur des emballages en tissu ou en synthétique (non-tissé).
- Ce ruban est un ruban indicateur pour autoclave. Il ne doit pas être utilisé pour des cycles de stérilisation par oxyde d'éthylène ou par chaleur sèche.

#### Conformité normative :

Le ruban 3M Comply 1322 répond aux exigences des normes :

NF EN 867-1 classe A  
ISO 11140-1 classe 1

Dispositif marqué CE : classe I, selon la Directive 93/42 EEC.

Fabriqué au Canada

### Produit

#### Description :

Le ruban indicateur pour autoclave 3M Comply 1322 se présente sous la forme d'un papier crêpe adhésif imprimé d'une encre indicatrice en diagonales qui vire progressivement au marron foncé lors d'un cycle de stérilisation par autoclave.

Il sert essentiellement à fermer les paquets de stérilisation et à différencier les lots stérilisés des lots non-stérilisés. Ils n'apportent pas de certitude quant à la stérilité des lots.

#### Caractéristiques :

Support	Papier crêpe
Adhésif	A base de caoutchouc synthétique et naturel
Encre indicatrice	Sans plomb
Couleur du support	Beige
Couleur de l'encre avant exposition à la vapeur	Ivoire

#### Conservation :

Le ruban indicateur 3M Comply 1322 doit être conservé dans un endroit sec (humidité relative maximale 50 %) et tempéré (15 - 30°C) et à l'abri des ultra-violets. Sa durée de validité est de 18 mois à compter de la date de fabrication, dans les conditions de conservation recommandées. Cette date est inscrite sur la bague de chaque rouleau ainsi que sur le carton d'emballage.

#### Présentation :

1322V12	55 m x 12 mm	42 rouleaux/carton
1322V18	55 m x 18mm	28 rouleaux/carton
1322V24	55 m x 24 mm	20 rouleaux/carton
1322V48	55 m x 48 mm	10 rouleaux/carton
1322BI (boîte individuelle)	55 m x 25 mm	12 rouleaux/carton

**3M France**  
**Marchés de la Santé**

Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy Pontoise Cedex  
Tél.: 01 30 31 82 82  
Fax : 01 30 31 83 83