

Getinge Assured

Bowie-Dick Test Card 134°C

La carte de test Bowie-Dick Getinge Assured est destinée à la surveillance quotidienne des autoclaves avec prévide fonctionnant à 134 °C. Les valeurs annoncées de 134 °C pour 3,5 minutes sont valables pour des cycles d'essais en laboratoire suivant les spécifications et exigences de la norme EN ISO 11140-4 relative aux indicateurs. Un véritable cycle d'essais Bowie-Dick en hôpital selon les spécifications de la norme EN 285 diffère du cycle d'essais selon la norme EN ISO 11140-4 et doit coïncider avec le cycle de routine des stérilisateur hospitaliers. Pour outrepasser les différences entre le cycle d'essais indicateurs et les cycles d'essais Bowie-Dick en hôpital, la norme EN 285 autorise des variations sur la période en plateau.

Par conséquent, les cycles du produit Getinge Bowie-Dick sont conçus avec une période en plateau inférieure à 3,5 minutes pour garantir l'équivalence avec les deux normes. Ce produit Getinge Assured a été testé et vérifié pour fournir des performances équivalentes et approuvées à la fois dans les cycles d'essais subatmosphériques et trans-atmosphériques selon la norme EN ISO 11140-4 et dans les cycles Getinge Bowie-Dick tels que spécifiés par la norme EN 285.

Caractéristiques de la Performance

Si le stérilisateur fonctionne correctement, le graphique de l'indicateur montre un changement de couleur du violet au vert uniforme sur l'ensemble de l'image de l'indicateur. S'il reste un excès d'air résiduel ou de gaz non condensables (défaillance majeure), l'indicateur ne sera pas d'une couleur vert uniforme mais restera violet au centre ou gris. Cela peut nécessiter une intervention sur le stérilisateur.

Caractéristiques Physiques

- **Revêtement plastique :** haut et bas
- **Dimensions :** 90 mm (L) x 46 mm (l)
- **Emballage Bowie-Dick Test Card:** 120 cartes de test



Restrictions Environnementales

Conservation : dans l'emballage scellé fourni, température ambiante 10 à 38 °C, humidité relative 10 à 60 %. Conserver le produit à l'écart de toute source de lumière et de chaleur.

Durée de Conservation

24 mois. La date d'expiration est indiquée sur l'emballage du produit.

Normes de Classification

ISO 11140-4, ISO 11140-1 Type 2 pour les indicateurs utilisés dans le cadre de tests spécifiques.

Informations de Commande

Getinge Assured

Référence

Bowie-Dick Test Card 134°C

504052400