

NOTE TECHNIQUE

Référence 341533

Témoins positifs. CONTRÔLE POSITIF (PG + OT) ZE/PGOT5

Des contrôles positifs combinés pénicilline G et oxytétracycline seront fournis pour vérifier la bonne exécution du test. Nous vous recommandons de tester cet échantillon lors du changement de lots.

Les échantillons de contrôle positif ne sont pas des échantillons de référence avec une concentration exacte en antibiotique. Ils sont positifs lorsqu'ils sont utilisés avec le test Duplex BT Scan.

La boîte de contrôles positifs contient 5 flacons d'antibiotiques lyophilisés.

Pour la préparation de l'échantillon, ajouter 5 ml d'un échantillon de lait négatif dans le flacon et agiter doucement. Laisser la solution pendant 15 min à température ambiante et mélanger le flacon plusieurs fois pendant ce temps pour une dissolution complète.

Le flacon lyophilisé doit être conservé au réfrigérateur (4-12 °C) jusqu'à son utilisation. Une fois la poudre dissoute, la préparation doit être conservée au congélateur pendant une semaine maximum. Pour éviter les cycles de congélation-décongélation, il est recommandé de diviser le volume en aliquotes adaptées à l'utilisation (par exemple 0,5 ml).