

FICHE TECHNIQUE

Référence	530085
Désignation	EXTRACTEUR DE LAME JETABLE FEATHER



Description :

- ✓ Le FEATHER® Blade Remover permet de retirer facilement et en toute sécurité les lames jetables usagées de tout type et de toute taille de manche de scalpel.
- ✓ Avantages :
 - Facilité d'utilisation : Le FEATHER® Blade Remover permet de retirer facilement et en toute sécurité les lames jetables usagées de tout type et de toute taille de manche de scalpel.
 - Sûr et hygiénique : L'absence de contact direct avec les lames offre la meilleure protection possible du personnel médical contre les infections.
 - Produit jetable : Une fois que l'extracteur de lames économique est rempli de lames usagées, il peut simplement être jeté.
- ✓ Mode d'emploi : Assurez-vous que le bon côté de la lame pointe vers le haut ; puis insérez la lame dans la fente de l'extracteur de lame jusqu'à ce qu'elle atteigne la butée. Appuyez doucement sur le bouton sur le dessus de l'extracteur de lame. Retirez la poignée. La lame retirée tombe en toute sécurité dans l'extracteur de lame fourni.

Unité de vente :

1 Extracteur de lame jetable