Fiche technique



Kit Fluo-RAL

Code produit: 359000-0000

Composition:

• Fixateur Fluo-RAL	code: 362115-0250	1 x 250 mL
Auramine Fluo-RAL	code: 362325-0125	1 x 125 mL
• Solution phéniquée pour Auramine Fluo-	·RAL	
	code: 362530-0125	1 x 125 mL
 Décolorant de Degommier Fluo-RAL 	code: 362210-0250	1 x 250 mL
Rouge thiazine Fluo-RAL	code: 362780-0125	1 x 125 mL
• Solution phéniquée pour Rouge thiazine	Fluo-RAL	
	code: 362610-0125	1 x 125 mL

Applications:

Bactériologie:

La coloration par le Kit Fluo-RAL permet la mise en évidence des mycobactéries aussi appelées B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcoolo-Résistants) par une technique de coloration par fluorescence selon Degommier.

L'Auramine Fluo-RAL, mélangée extemporanément avec la Solution phéniquée pour auramine Fluo-RAL, colore en jaune-vert fluorescent les mycobactéries.

Le Décolorant de Degommier Fluo-RAL décolore toutes les bactéries autres que les mycobactéries.

Le Rouge thiazine Fluo-RAL, mélangé extemporanément avec la Solution phéniquée pour Rouge thiazine Fluo-RAL, colore le fond de la préparation en rouge.

Mise à jour du 15/04/2013