

PHOSPHAX

NEUTRALISANT ACIDE POUR AUTOLAVEURS
ET RÉNOVATION DES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

INSTRUMENTATION CHIRURGICALE



AUTOLAVEUR



■ AVANTAGES ET QUALITÉS

- Double action détartrante : dissolution des dépôts de calcaire et prévention de la formation de nouveaux dépôts
- Neutralisation des détergents utilisés lors de la phase de lavage
- Désagrégation des mousses résiduelles avant le rinçage final
- Rénovation de l'instrumentation chirurgicale pour lui donner un aspect plus brillant



Fb **Franklab**[®]
notre expertise l'Ultra-Propreté



PHOSPHAX

NEUTRALISANT ACIDE POUR AUTOLAVEURS ET RÉNOVATION DES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

■ MODE D'EMPLOI

■ NEUTRALISATION ACIDE EN AUTOLAVEUR



■ Réglage de la phase de rinçage intermédiaire du cycle du LDI :

- Concentration préconisée :0,3 à 1% selon le détergent utilisé et la dureté de l'eau
- Température préconisée :40 à 60°C
- Temps de contact préconisé :2 à 4 minutes

■ Produits à associer lors du cycle :

■ Phase de lavage :

- TFD Premium (FT 1730.B) :détergent inactivant des prions et amyloïcide
- ENZYMEX L7 (FT 790.B) :détergent enzymatique
- C-PRO 2 (FT 110.B) :détergent peu alcalin
- TFD 7 (FT 020.B) :détergent alcalin

■ Rinçage final :

- RINCE L7 (FT 1060.B) :additif de rinçage et activateur de séchage neutre
- C-NET 2 (FT 820.B) :additif de rinçage et activateur de séchage neutre

■ RÉNOVATION DE L'INSTRUMENTATION CHIRURGICALE PAR TREMPAGE



- Concentration préconisée :5 à 50% selon l'état des instruments chirurgicaux
- Température préconisée :20 à 60°C
- Temps de contact préconisé :15 minutes

La rénovation des instruments chirurgicaux doit être suivie d'une lubrification afin de protéger à nouveau le matériel en formant une couche protectrice à base de paraffine à la surface de l'acier inoxydable : LUBRIX Spray (FT 1020.B).

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FS010317)

■ CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : Liquide
- Couleur : Incolore
- pH à 0,3% : 2,0
- pH à 1% : 1,7
- pH à 5% : 1,3
- pH à 50% : <1
- Péréemption : 4 ans

■ COMPOSITION

- Acide phosphorique

■ CONDITIONNEMENTS

- 1 Carton de 6 bidons de 5 Lréf. **1031730**
- 2 Carton de 2 bidons de 10 Lréf. **1031722**
- 3 Carton de 3 bidons bas de 5 Lréf. **1031715**



Produit Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical Classe 1.