





- Traitement des surfaces et des dispositifs médicaux destinés à la maîtrise des risques microbiologiques liés à l'environnement (ex : lit, table d'opération, monitoring, générateurs d'hémodialyse, respirateurs, units dentaires)
- Adaptées aux grandes surfaces (FB wipes XXL)
- Solution d'imprégnation à pH neutre, sans parfum
- Activité virucide contre les virus enveloppés
- Actives sur les spores de Bacillus subtilis et de Clostridium difficile
- Compatibles avec un large panel de matériaux dont les revêtements synthétiques







# **FB** Wipes



## LINGETTES NETTOYANTES ET DÉSINFECTANTES

#### MODE D'EMPLOI

#### 1ère utilisation des lingettes:

- Porter des gants et retirer l'opercule protecteur.
- Sortir la 1ère lingette d'une main en maintenant le paquet de l'autre main.

#### Utilisation:

- 1- Nettoyer la zone à traiter en prenant autant de lingettes que nécessaire
- 2- S'assurer que le temps de contact est conforme à l'activité antimicrobienne recherchée.
- 3- Bien refermer le paquet après usage. Ne pas réutiliser la lingette.

Ne nécessite pas de rinçage, sauf indication contraire du fabricant du revêtement de surface traité ou pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

### PROPRIÉTÉS DÉSINFECTANTES

Activités	Normes	Concentration	Temps de contact
Bactéricidie	EN 1276 / EN 13727 / EN 13697	100%	1 minute
	EN 16615	100%	2 minutes
	EN 14561	100%	5 minutes
Levuricidie	EN 13624 / EN 1650	100%	1 minute
	EN 16615	100%	2 minutes
	EN 13697 / EN 14562	100%	5 minutes
Fongicidie	EN 13697	100%	5 minutes
	EN 1650 / EN 13624 / EN 14562	100%	10 minutes
Virucidie	EN 14476 Rotavirus, PRV (virus modèle de l'hépatite B), DBV (virus modèle de l'hépatite C), Virus VRS	100%	5 minutes
	EN 14476 Vaccinia Virus	100%	5 minutes
Sporicidie	EN 13704 B.subtilis et Clostridium difficile	100%	15 minutes

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FS 010785)

## CARACTÉRISTIQUES

- Taille de la lingette : FB wipes (180 x 200 mm)

  FB wipes XXL (240 x 300 mm)
- pH de la solution d'imprégnation : 6
- Péremption : 3 ans

### COMPOSITION

- Agents de surface non ioniques
- Ammonium quaternaire

#### CONDITIONNEMENTS

#### **FB Wipes**

① Carton de 12 sachets 100 lingettes.....réf. 10785142

#### **FB Wipes XXL**

@ Carton de 12 sachets 60 lingettes .....réf. 10785145

0





Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.







