

Masque de protection MASK UNS1

Masque de protection lavable et réutilisable

Lavable & réutilisable

Set de 2 masques
(2x 4heures)

Douceur et Confort



Matière certifiée Oeko-tex



Masque de Catégorie 1 UNS1

Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public
(suivant la note d'information interministérielle du 29 mars 2020)

Efficacité de filtration des particules de 3µm : 98.4% (particules de 1µm : 96%)
Respirabilité : essai de perméabilité à l'air 243 L.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa
(Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020)
Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

Produit	MASK UNS1
Référence	MS0001 - EAN 3120760087947
Dimensions	Taille unique
Composition	Jersey 57% coton/ 38% Polyester/ 5% Elasthane
Test and Certificates	Oeko-tex



Conditionnement	Set de 2 masques UNS-1
carton 59x39x30cm	400 sets par carton (800 masques)
palette 120x80cm	24 cartons par palette (19200 masques)

Préconisations d'entretien



laver une première fois avant toute première utilisation

Cédooc collectivités - 7 place des Minimes 42300 ROANNE

Masque de protection PM MASK UNS1 - EAN 3120760087947
Masque de protection lavable et réutilisable

Notice d'utilisation accompagnant la mise sur le marché de Masques à Usages Non Sanitaires catégorie 1 suivant la note d'information interministérielle du 29 mars 2020

Domaine d'utilisation

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leur activités (hôtesses de caisses, agents des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Performances

Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020

Masque catégorie 1 « UNS 1 » = masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.

Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa

Utilisation

le temps de port du masque est limité à 4 heures.

Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins.

Recommandations de manipulation des masques

Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ; appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte; lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher; ne pas déplacer le masque ; chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ;

si besoin de boire ou de manger, changer de masque ;

lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique ;

pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou dans un sac prévu à cet usage ; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique. :

Entretien du masque

après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Explication sur la méthode de lavage

Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique. Séchage en tambour.

Composition de la matière principale : 57% coton/ 38% Polyester/ 5% Elasthane

Stockage : masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Contexte d'utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

