



PHAGOSPRAY DM

**Nettoyant désinfectant hydro-alcoolique
pour la désinfection des surfaces**



Points forts

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Large spectre désinfectant pour prévenir les infections nosocomiales
- ✓ Efficace sur Rotavirus en 5 min.
- ✓ Utilisé pour une désinfection rapide

Conditionnements

Présentation	Code	Nombre d'unités par carton
Flacon de 750 ml	P60416	6 unités
Bidon de 5 litres	P60414	2 unités



Laboratoire
phagogène®

Christeys France – Division santé Laboratoire Phagogène
9, rue Marcel Sembat 44100 Nantes - France
Tel : +33 (0)2 40 57 56 10 / Fax : +33 (0)2 40 57 56 39
www.phagogene.fr



PHAGOSPRAY DM

Domaine d'utilisation

- ✓ Le **PHAGOSPRAY DM** est un nettoyant désinfectant professionnel pour la désinfection des surfaces dans les environnements à risques.
- ✓ Le **PHAGOSPRAY DM** peut être utilisé en pulvérisation sur les murs, les plafonds et le mobilier des services de soins et de chirurgie. Il peut aussi être utilisé en application sur un linge à usage unique pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.

Composition

- ✓ Substances actives
 - Ethanol (N° CAS : 64-17-5) : 23,46 % m/m
 - Chlorure de didécyltriméthylammonium (N° CAS : 7173-51-5) : 0,14 % m/m
 - Alkylamine (N° CAS : 2372-82-9) : 0,228% m/m
- ✓ Parfum : pamplemousse

Caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques

- ✓ Aspect : liquide limpide
- ✓ Couleur : incolore
- ✓ Odeur : pamplemousse
- ✓ pH à 20°C (produit pur) : 9,5 à 11,0
- ✓ Masse volumique à 20°C (g/ml) : 0,968 +/- 0,005

Mode d'emploi

- ✓ **PHAGOSPRAY DM** est prêt à l'emploi
- ✓ **PHAGOSPRAY DM** doit être utilisé pur et ne doit pas être rincé, sauf en cas de désinfection des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les denrées alimentaires où le **PHAGOSPRAY DM** doit être rincé à l'eau potable. (Conformément à l'arrêté du 8 septembre 1999)
- ✓ Pulvériser sur un linge à usage unique et/ou appliquer sur la surface à désinfecter
- ✓ Eviter de faire ruisseler le produit
- ✓ Laisser agir 5 minutes pour une activité bactéricide ou 15 minutes pour un spectre complet.
- ✓ *Ne pas utiliser en machines de désinfection terminale. Utiliser en sprayer.*

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Activité antimicrobienne

Normes	Concentration	Temps
BACTERICIDE		
EN 1040 (<i>P.aeruginosa</i> et <i>S.aureus</i>)	0,5 %	1 min.
EN 1276 cond. propreté (<i>E.coli</i> , <i>E.hirae</i> , <i>P.aeruginosa</i> et <i>S.aureus</i>)	80 %	15 min.
EN 13697 cond. propreté (<i>E.coli</i> , <i>E.hirae</i> , <i>P.aeruginosa</i> et <i>S.aureus</i>)	100 %	5 min.
EN 13697 cond. saleté (<i>S.typhimurium</i>)	10 %	5 min.
EN 13727 cond. saleté (<i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> et <i>E.hirae</i>)	50 %	5 min.
FONGICIDE		
EN 1275 (<i>C.albicans</i>)	2,5 %	15 min.
EN 13697 cond. propreté (<i>C.albicans</i>)	100 %	15 min.
EN 13624 cond. propreté (<i>C.albicans</i>)	25 %	5 min.
MYCOBACTERICIDE		
EN 14348 cond. propreté (<i>M.avium</i>)	50 %	15 min.
VIRUCIDE		
EN 14476 (Rotavirus)	90 %	5 min.
HIV1	100 %	1 min.
HBV	0,25 %	10 min.
EN 14476 (Influenza A/H1N1)	80 %	30 s.



Laboratoire
phagogène®

Christeyns France – Division santé Laboratoire Phagogène
9, rue Marcel Sembat 44100 Nantes - France
Tel : +33 (0)2 40 57 56 10 / Fax : +33 (0)2 40 57 56 39
www.phagogene.fr