

DÉTERGENT DÉSINFECTANT POUR L'HYGIÈNE DES SOLS, DES SURFACES ET DU MATÉRIEL EN ENVIRONNEMENT À RISQUES



PHAGO'SURF 2D



- Large spectre désinfectant
- Séchage rapide, sans trace
- Sans parfum
- Produit "contact alimentaire"

UTILISATION

PHAGO'SURF 2D est un liquide concentré destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, surfaces et matériels en environnement à risques. C'est un nettoyant efficace et un désinfectant à large spectre (bactéricide, levuricide, fongicide, tuberculocide et actif sur virus).

PHAGO'SURF 2D nécessite un rinçage sur les surfaces susceptibles d'entrer en contact direct avec les denrées alimentaires (conformément à l'arrêté du 8 septembre 1999).

PHAGO'SURF 2D est un produit biocide enregistré en TP2 et TP4.

COMPOSITION

Substances actives :

Chlorure de didécyldiméthylammonium

(N° CAS : 7173-51-5) : 3,5% m/m

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine

(N° CAS : 2372-82-9) : 5,5% m/m

Autres composants : agents de surface non ioniques <5%

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide

Couleur : incolore à jaune

pH à 20°C (produit pur) : 9,1 +/- 0,3

pH à 20°C (produit dilué à 0,25% eau du réseau) : environ 8,0

Densité : 1,054 +/- 0,005

COMPATIBILITÉS

Large compatibilité (voir liste dans le dossier scientifique).

MODE D'EMPLOI

Diluer 1 dose de 20 ml dans 8 L d'eau froide ou tiède du réseau (soit une dilution à 0,25%). Utilisation en lavage à plat ou en nettoyage humide. Temps de contact :

- 15 minutes pour une activité bactéricide, levuricide, fongicide et sur virus.
- 30 minutes pour une activité tuberculocide.

Rincer à l'eau les surfaces susceptibles d'entrer en contact direct avec des denrées alimentaires.

ACTIVITÉS MICROBIOLOGIQUES

Tests d'efficacité réalisés sur le produit dilué à 0,25%

BACTÉRICIDE

EN 13727 + A1 en conditions de saleté, 5 min.

EN 13697 en conditions de saleté, 15 min.

EN 16615 en conditions de saleté, 15min.

LEVURICIDE

EN 13624 en conditions de saleté (*C.albicans*), 15 min.

EN 13697 en conditions de saleté (*C.albicans*), 15 min.

FONGICIDE

EN 16615 en conditions de saleté, 15 min.

TUBERCULOCIDE

EN 14348 (*M. terrae*), 30 min.

ACTIF SUR VIRUS

EN 14476 + A1 en conditions de saleté (BVDV), 15 min.

EN 16777 en conditions de saleté (*Vaccinia virus*), 15 min.

Actif sur HBV, HCV, HIV, *Herpès virus*, *Coronavirus*, *orthomyxovirus*, *Influenza A/H5N1* et *Influenza A/H1N1*, 15min.

CONSERVATION

La solution est stable pendant 5 jours dans un récipient fermé et stocké à température ambiante.

Péremption : 24 mois à partir de la date de fabrication.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit réservé à un usage professionnel. Port des gants conseillé.

La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

RÉFÉRENCES

60424	250x20mL doses
60428	4X1L One2Dose
60423	2x5L
60425	20L

