

Meliseptol® Wipes sensitive

Lingettes désinfectantes pour surfaces sensibles



Désinfection

Désinfection



Propriétés

Meliseptol® Wipes sensitive

- Lingettes douces prêtes à l'emploi (15.2 x 20 cm) pour la désinfection des surfaces sensibles à l'alcool, dont les sondes vaginales
- Imprégnées de Meliseptol® Foam pure (pour en connaître les caractéristiques, voir Meliseptol® Foam pure)
- Très bonne compatibilité avec les matériaux
- Action rapide, même contre les polyomavirus
- Sans aldéhydes ni amines
- Sans colorants et sans parfum
- Liquide imbibant certifié DGHM²⁾ / VAH³⁾ et figure sur la liste des virucides IHO⁴⁾

Meliseptol® Wipes sensitive ... préservation à long terme de l'état du matériel médical de qualité

La qualité non tissée douce et non pelucheuse des lingettes protège les surfaces les plus fragiles des rayures. La lotion Meliseptol® Foam pure n'abîme pas les matériaux, même les plus fragiles. La quantité de liquide imbibant permet d'empêcher la pénétration d'humidité à l'intérieur des dispositifs et une obstruction de leurs orifices fins. Compatible avec de nombreux échographes et sondes.

Compatibilité avec les matériaux

- Echographes et sondes d'échographie (par ex. Philips, Hitachi, ALOKA)
- Plexiglas
- Tables et fauteuils d'examen de la société Schmitz
- Latex et caoutchouc
- Silicone
- Makrolon
- Terminaux à carte CCv Deutschland
- Générateurs d'hémodialyse Dialog⁺
- Perfusor® Space
- Infusomat® Space

Spectre d'action / durées d'action (DA)

Domaine d'utilisation	DA
Désinfection des surfaces selon DGHM / VAH bactéricide / levurocide	1 min.* faible charge 2 min.* charge élevée
Virus de la grippe aviaire	15 sec.
Action virucide limitée (y compris VHB, VHC, VIH)	1 min.
Rotavirus	1 min.
TbB (M. terrae)	3 min.
Polyomavirus	5 min.
Norovirus**	5 min.

* La valeur de listage la plus courte possible est de 5 min. pour VAH.

** Surrogatvirus MNV

Instructions d'utilisation

Essuyer les surfaces avec les lingettes Meliseptol® Wipes sensitive de manière à les imprégner entièrement de solution active. Laisser agir pendant le temps indiqué dans le tableau. Ne pas frotter les surfaces pour les sécher.

Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou des appareils électriques sous tension !

Remplissage du distributeur : découper le sachet plastique et insérer dans le distributeur. Tirer la première lingette du centre du rouleau de lingettes et l'introduire dans l'orifice de distribution du couvercle. Visser le couvercle sur le distributeur.

Convient également aux surfaces sensibles à l'alcool

Article	N° art.
Distributeur pour 60 lingettes	19582
Recharge de 60 lingettes	19530



Données physico-chimiques

Aspect : lingettes blanches
Odeur : discrète
Densité : env. 0,98 g/ml
Point d'inflammation : +31 °C

Meliseptol® Foam pure

100 g de solution contiennent : 17 g de propan-1-ol, 0,23 g de chlorure de d'écylidiméthylammonium, tensioactifs non-ioniques

Indications selon le règlement (CE) n°648/2004 relatif aux détergents : < 5 % de tensioactifs non-ioniques

Indications selon l'ordonnance sur les substances dangereuses : irritant. Risque de lésions oculaires graves. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.

Eviter le contact avec la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter des lunettes / un masque de protection.

Conserver hors de la portée des enfants.

1) selon les recommandations de l'Institut Robert Koch, Bundesgesundheitsblatt 01-2004

2) DGHM = Société allemande de l'hygiène et de la microbiologie (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie)

3) VAH = Association pour l'hygiène appliquée (Verband für Angewandte Hygiene)

4) www.iho-viruzidie-liste.de