



Dossier d'information Euro Pharmat

DISPOSITIF MEDICAL

Omnifix®

Seringues 3 pièces à usage unique sans aiguille

| 1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise | | Date d'édition / mise à jour : 12/11/2018 |
|--|---|---|
| 1.1 | Nom : B. Braun Medical | |
| 1.2 | Adresse complète : 26 rue Armengaud 92 210 Saint-Cloud | Tel: 01 41 10 53 00 Fax : 01 41 10 53 99 e-mail : infofrance@bbraun.com Site Internet : http://www.bbraun.fr |
| 1.3 | Coordonnées du correspondant matériorvigilance : Manuelle SCHNEIDER- PONSOT | Tél. : 01 41 10 53 00 Fax : 01 41 10 52 86 e-mail : vigilance_qualite.fr@bbraun.com |


| 2. Informations sur dispositif ou équipement | |
|--|---|
| 2.1 | Dénomination commune : Seringues Trois Pièces |
| 2.2 | Nom commercial : Seringues Omnifix® |
| 2.3 | Inscription selon la nomenclature Cladimed : <ul style="list-style-type: none">- Seringues – (3 pièces embout Luer) : K54BB02 SERINGUE 3 PIECES EMBOUT LUER- Seringues – (3 pièces embout Luer/Lock) : K54BB03 SERINGUE 3 PIECES EMBOUT LUER LOCK- Seringues – (3 pièces embout Sonde) : A50DA01 SERINGUE 3 PIECES EMBOUT SONDE STANDARD |
| 2.4 | Code LPPR (ex TIPS si applicable) : N/A |
| 2.5 | Classe du DM : Classe I stérile avec fonction de mesurage : Omnifix embout luer et embout sonde Classe IIa : Omnifix embout Luer Lock Directive de l'UE applicable : 93/42/CEE Annexe V (classe Ism) ou Annexe II .3 (classe IIa) Numéro de l'organisme notifié : TÜV Product Service (0123) Date de première mise sur le marché dans l'UE : Fabricant du DM : B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse,1 D-34212 Melsungen, Allemagne |

Référence interne : PRF_20181112

FR01-M-5-3-03-000-1-G-FR - Grille EUROPHARMAT BBMF

(d'après la mise à jour du 07/05/2010 - EUROPHARMAT - Dossier DM-Grille- 030510.doc)

2.6 Descriptif du dispositif :

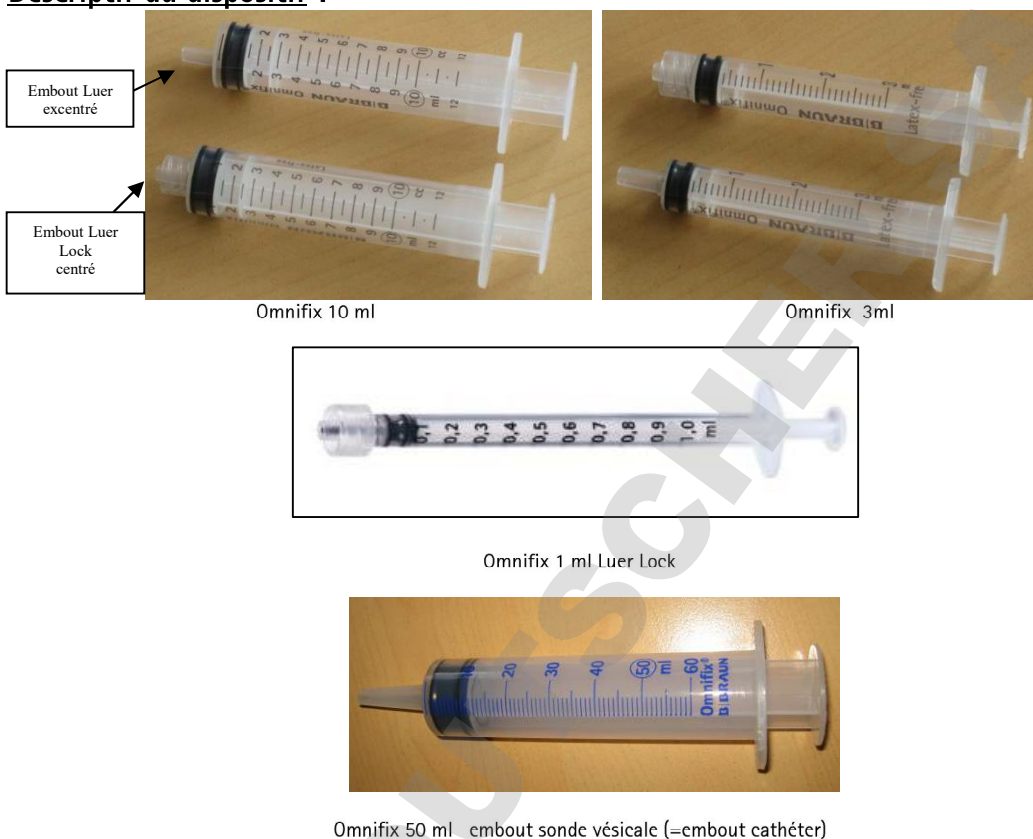

Caractéristiques techniques et spécifications

- Corps de seringue transparent
- Absence de latex

2.7 Référence Catalogue :

| Référence | Libellé | Graduation | UCD (Unité de Commande) | QML (Quantité minimale de livraison) | Graduation complémentaire jusqu'à |
|-----------|--|------------|-------------------------------|---|---|
| 4616025V | Seringue OMNIFIX 3 ml Luer centré | 0,1ml | 100/boîte | 100/boîte | - |
| 4616057V | Seringue OMNIFIX 5 ml Luer excentré | 0,2ml | 100/boîte | 100/boîte | - |
| 4616103V | Seringue OMNIFIX 10 ml Luer excentré | 0,5ml | 100/boîte | 100/boîte | 12 ml |
| 4616200V | Seringue OMNIFIX 20 ml Luer excentré | 1,0ml | 100/boîte | 100/boîte | - |
| 4616308F | Seringue OMNIFIX 30 ml Luer excentré | 1,0ml | 100/boîte | 100/boîte | - |
| 4616502F | Seringue OMNIFIX 50 ml Luer excentré | 1,0ml | 100/boîte | 100/boîte | 60 ml |
| 9167006V | Seringue OMNIFIX 1ML Luer Lock centré | 0,01ml | 100/boîte | 100/boîte | |
| 4617022V | Seringue OMNIFIX 3 ml Luer Lock centré | 0,1ml | 100/boîte | 100/boîte | - |
| 4617053V | Seringue OMNIFIX 5 ml Luer Lock centré | 0,2ml | 100/boîte | 100/boîte | - |
| 4617100V | Seringue OMNIFIX 10 ml Luer Lock centré | 0,5ml | 100/boîte | 100/boîte | 12 ml |
| 4617207V | Seringue OMNIFIX 20 ml Luer Lock centré | 1,0ml | 100/boîte | 100/boîte | - |
| 4617304F | Seringue OMNIFIX 30 ml Luer Lock centré | 1,0ml | 100/boîte | 100/boîte | - |
| 4617509F | Seringue OMNIFIX 50 ml Luer Lock centré | 1,0ml | 100/boîte | 100/boîte | 60 ml |
| 4613503F | Seringue OMNIFIX 50 ml embout sonde vésicale | 1,0ml | 100/boîte | 100/boîte | 60 ml |
| 4613554F | Seringue OMNIFIX 50 ml embout sonde vésicale (adaptateur Luer / poignée d'aspiration) | 1,0ml | 100/boîte | 100/boîte | 60 ml |
| 4614003F | Seringue OMNIFIX 100 ml embout sonde vésicale (adaptateur Luer / poignée d'aspiration) | 2,0ml | 100/boîte | 100/boîte | - |

Référence interne : PRF_2018112

FR01-M-5-3-03-000-1-G-FR - Grille EUROPHARMAT BBMF

(d'après la mise à jour du 07/05/2010 - EUROPHARMAT - Dossier DM-Grille- 030510.doc)

| | Blister individuel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------------|---|------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---|
| 2.8 | <p>Composition du dispositif et des ses accessoires :</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ELEMENTS</th> <th style="width: 50%;">MATERIAUX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corps de seringue</td> <td>Polypropylène</td> </tr> <tr> <td>Piston 1 ML</td> <td>Polystyrene</td> </tr> <tr> <td>Piston 3 – 50 ML</td> <td>Polypropylène</td> </tr> <tr> <td>Tête de piston</td> <td>Polyisoprène</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le produit contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> - du latex - du PVC - de l'huile de silicone - des produits d'origine animale ou biologique - des phtalates - du thiurame <table style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> OUI</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> NON</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> OUI</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> NON</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> OUI</td> <td><input type="checkbox"/> NON</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> OUI</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> NON</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> OUI</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> NON</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> OUI</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> NON</td> </tr> </table> <p>Dispositifs et accessoires associés à lister : N/A</p> | ELEMENTS | MATERIAUX | Corps de seringue | Polypropylène | Piston 1 ML | Polystyrene | Piston 3 – 50 ML | Polypropylène | Tête de piston | Polyisoprène | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| ELEMENTS | MATERIAUX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Corps de seringue | Polypropylène | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piston 1 ML | Polystyrene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piston 3 – 50 ML | Polypropylène | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tête de piston | Polyisoprène | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | Domaine – Indications : Injection et Prélèvement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Procédé de stérilisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>DM stérile : OUI</p> <p>Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d'éthylène</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Conditions de conservation et de stockage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Délai de péremption: 5 ans</p> <p>Conditions normales de conservation Et de stockage</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Sécurité d'utilisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Sécurité technique : N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Sécurité biologique : N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Conseils d'utilisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Mode d'emploi : N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | <p>Indications : (destination marquage CE)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seringues hypodermiques à usage unique - Seringues pour irrigation (embout sonde vésicale) <p><u>Pour les références avec embout luer lock uniquement.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peut être utilisé sur pousse-seringue (se référer à la notice d'utilisation du pousse-seringue pour vérifier la compatibilité) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | <p>Précautions d'emploi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ne pas utiliser si l'emballage primaire est endommagé ou ouvert. - Usage unique - Ne pas réutiliser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | <p>Contre-Indications :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Injections de produits incompatibles avec le polypropylène | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


- Utilisation sur pousse-seringues (seringues embout luer uniquement)

| | |
|---|---|
| 7. Informations complémentaires sur le produit | |
| | <u>Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc.) ... : sans objet</u> |

| | |
|--|------------------------------|
| 8. Liste des annexes au dossier | |
| | Etiquette Conditionnement |

Seringue OMNIFIX 10 mL Luer excentré

Etiquette

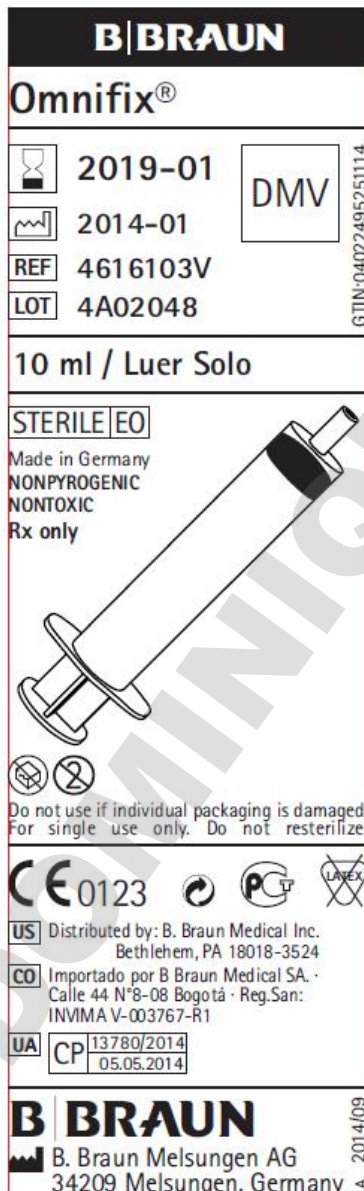

B|BRAUN
Omnifix®

2019-01 2014-01
REF 4616103V
LOT 4A02048

DMV
GTIN:04022495251114

10 ml / Luer Solo

STERILE EO
Made in Germany
NONPYROGENIC
NONTXIC
Rx only

Do not use if individual packaging is damaged.
For single use only. Do not resterilize.

CE 0123
Distributed by: B. Braun Medical Inc.
Bethlehem, PA 18018-3524
Importado por B Braun Medical SA.
Calle 44 N°8-08 Bogotá - Reg.San:
INVIMA V-003767-R1

UA CP 13780/2014
05.05.2014

B BRAUN
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany

2014/09
01-M-5
ise à jour

Conditionnement



Omnifix®

100 10 ml

2019-01 2014-01
REF 4616103V
LOT 4A02048
PZN 00569964

Luer Solo

BR-Registro ANVISA No-10008530288

UA-CP 13780/2014
05.05.2014

4 022495 251121

(17)190100(10)4A02048

s



08.08.14
16:46

Omnifix®

1200 10 ml

2019-01 2014-01
REF 4616103V
LOT 4A02048
12 x PZN 00569964

Luer Solo

BR-Registro ANVISA No-10008530288

UA-CP 13780/2014
05.05.2014

4 022495 251138

(17)190100(10)4A02048

u

Seringue OMNIFIX 1 mL Luer Lock centré

Etiquettes

| | |
|---|------------|
| B BRAUN | |
| Omnifix®-F Luer Lock Solo | |
| 0,01 ml - 1 ml | |
|  | 2022-01-01 |
|  | 2017-01-02 |
| LOT | 17A02C8 |
| REF | 9167006V |
| GTIN:04046955155217 | DMV |
|  | |
| Manufacturing Site: ALMO- Erzeugnisse Erwin Busch GmbH, Große Allee 84, 34454 Bad Arolsen, Germany | |
| STERILE | EO |
| Made in Germany | |
|  | 0123 |
| B. Braun Melsungen AG | |
| 34209 Melsungen, Germany | |
| B BRAUN | |

Conditionnement

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 23.06.17 09:47 |  | 0 0 1 1 |
| Omnifix®-F | | |
| 2400 | 1 ml | |
|  | 2022-01-01 | |
|  | 2017-01-02 | |
| LOT | 17A02C8 | |
| REF | 9167006V | |
| 24 x PZN 12749565 | | |
| |  | Luer Lock Solo |
| | | 4 046955 153596 |
| |  | (17)220101(10)17A02C8 |

Référence interne : PRF_20181112

FR01-M-5-3-03-000-1-G-FR - Grille EUROPHARMAT BBMF

(d'après la mise à jour du 07/05/2010 - EUROPHARMAT - Dossier DM-Grille- 030510.doc)



Dossier d'information Euro Pharmat

DISPOSITIF MEDICAL

Seringue OMNIFIX 30 mL Luer Lock centré

Etiquettes

B|BRAUN B|BRAUN

Omnifix®

2019-01 **DMV**

2014-01

REF 4617304F

LOT 4A02048

GTIN:04022495181664

30 ml / Luer Lock Solo

STERILE EO

Made in Germany
NONPYROGENIC
NONTOXIC
Rx only



Do not use if individual packaging is damaged.
For single use only. Do not resterilize.

CE 0123

US Distributed by: B. Braun Medical Inc.
Bethlehem, PA 18018-3524

CO Importado por B Braun Medical SA.
Calle 44 N°8-08 Bogotá - Reg.San:
INVIMA V-003767-R1

EC Reg. No.: DM-2621-04-13

B BRAUN

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany

1A 2014/09

Conditionnement

Omnifix®

100 30 ml

2019-01

2014-01

REF 4617304F

LOT 4A02048

PZN 00570045



Luer Lock Solo

RU-Per.Уд. ФС № 2006/2047 от 18.12.2006.
EC-Reg San.: DM-2621-04-13

4 022495 181688

(17)190100(10)4A02048

s

04.09.14
08:55



Omnifix®

600 30 ml

2019-01

2014-01

REF 4617304F

LOT 4A02048

6 x PZN 00570045



Luer Lock Solo

RU-Per.Уд. ФС № 2006/2047 от 18.12.2006.
EC-Reg San.: DM-2621-04-13

4 022495 181701

(17)190100(10)4A02048

u

Référence interne : PRF_20181112

FR01-M-5-3-03-000-1-G-FR - Grille EUROPHARMAT BBMF

(d'après la mise à jour du 07/05/2010 - EUROPHARMAT - Dossier DM-Grille- 030510.doc)


Seringue OMNIFIX 50 mL Luer Lock centré

Etiquettes

Conditionnement

B BRAUN B BRAUN B BRAUN B BRAUN B BRAUN B


Omnifix® Luer Lock Solo
50 ml

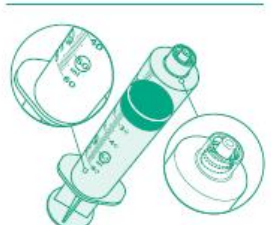

YY-YY-MM
 YY-YY-MM
REF 4617509F
 STERILE EO LOT Batchno. XXX.
 PZN 00570068 0713

INVIMA V-003767-R1
 DEPKES RI AKL 20902600243
 Шприц Омнификс 50(60) мл, без иглы.
 РУ № ФСЗ 2009/05984 от 31.12.2009.

Manufacturing Site / Производственное:
 B. Braun Medical AG, Hauptstrasse 39,
 6182 Escholzmatt, Switzerland




B BRAUN
 B. Braun Melsungen AG
 34209 Melsungen
 Germany

0713 - 1 72018

LLDorder 2122 - 0 130752
Format: 67 x 295 mm


Omnifix® Luer Lock Solo **50 ml**

100 | 0813

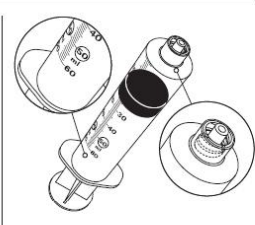

YY-YY-MM
 YY-YY-MM
 LOT BATCH
REF 4617509F
 100 x PZN 00570068

STERILE EO CE 0123





B BRAUN
 B. Braun Melsungen AG
 34209 Melsungen, Germany

INVIMA V-003767-R1
 DEPKES RI AKL 20902600243
 Шприц Омнификс 50(60) мл,
 без иглы. РУ № ФСЗ 2009/05984
 от 31.12.2009. Производитель:
 «Б.Браун Мельзунген АГ»,
 Карл-Браун-Штрассе 1, 34212
 Мельзунген, Германия. B. Braun
 Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1,
 34212 Melsungen, Germany.
 Произведено: «Б.Браун Медикал АГ»,
 Хауптштрассе 39, 6182 Эшольцматт,
 Швейцария.

Manufacturing Site:
 B. Braun Medical AG, Hauptstrasse 39,
 6182 Escholzmatt, Switzerland
 Made in Switzerland

999


 EAN-13


 EAN-128

74125_4617509F_C100_Omnifix-KET.indd 1

29.08.13 15:28

LLDorder 2174 - Grunewald 131065

Référence interne : PRF_20181112

FR01-M-5-3-03-000-1-G-FR - Grille EUROPHARMAT BBMF

(d'après la mise à jour du 07/05/2010 - EUROPHARMAT - Dossier DM-Grille- 030510.doc)

Seringue OMNIFIX 50 mL embout sonde vésicale (adaptateur Luer / poignée d'aspiration)


Etiquettes



B BRAUN B BRAUN B BRAUN B BRAUN B BRAUN B B

Omnifix® 50 ml
Catheter/Luer Adaptor

[YY] YYYY-MM [DMV]
 [YY] YYYY-MM
 [REF] 4613554F
 [STERILE] [LOT] Batchno.000.
 PZN 00570080 0113

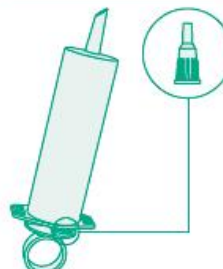

[ID] DEPKES RI AKL 210802800243
 [FE] Fabricado por B. Braun Medical AG - Suiza para B. Braun Melsungen AG - Alemania, RS N° DM0061E, Importado por: B. Braun Medical Perú S.A., Av. Separadora Industrial 887 Ate - Lima-Perú, RUC: 20377339461, DT. QF. Jacqueline Pilco P.


[STERILE] [CE 0123]
 Made in Switzerland
 [PC] [DXTK] [PVC] [PHT] [BEPK]

B BRAUN
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany

0113 - 1 73011

LLDorder 1813 - G 121527

Conditionnement

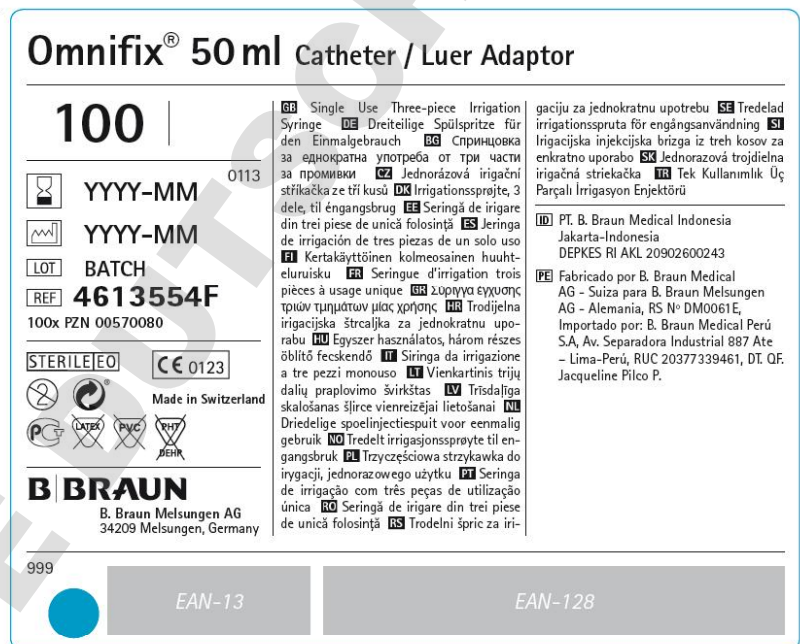

Omnifix® 50 ml Catheter / Luer Adaptor

100

[YY] YYYY-MM 0113
 [YY] YYYY-MM
 [LOT] BATCH
 [REF] 4613554F
 100x PZN 00570080

[STERILE] [CE 0123]
 Made in Switzerland
 [PC] [DXTK] [PVC] [PHT] [BEPK]

B BRAUN
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany

999

[EAN-13] [EAN-128]

[GB] Single Use Three-piece Irrigation Syringe [DE] Dreiteilige Spülspritze für den Einmalgebrauch [BG] Спринцовка за еднократна употреба от три части за промивки [CZ] Jednorázová irigační stříkačka ze tří kusů [DA] Irrigationssprøjte, 3 dele, til éngangsbrug [ES] Seringá de irigare din trei piese de unicá folosintá [FR] Seringa de irrigación de tres piezas de un solo uso [FI] Kertäkäyttöinen kolmeosainen huuhTELURUISKU [HU] Seringue d'irrigation trois piéces á usage unique [GR] Σιγίγγα εγγυσις τριών τμημάτων για χρήση [IT] Troldjelna irigacijska štrcaljka za jednokratnu uporabu [LT] Egyszer használatos, három részes öblítő fecskendő [LV] Siringa da irrigazione a tre pezzī monouso [NL] Vienkartinis trijų dalių praplovimo švirkštas [NO] Trisdaliga skaløsanas sjirce vienreizējai lietošanai [PL] Driedelige spoelinjectiespuit voor eenmalig gebruik [PT] Tredeltl irigasijsjonssprøyte til éngangsbruk [RO] Trzyczęściowa strzykawka do irygacji, jednorazowego użytku [RU] Seringa de irigação com três peças de utilização única [SK] Seringá de irigare din trei piese de unicá folosintá [SE] Trodelni špic za iri-

gaciju za jednokratnu potrobu [SI] Tredelad irigacijsospruta för éngangsánvándning [SL] Irigacijska injekcijska brizga iz treh kosov za enkratno uporabo [SR] Jednorazová trojdielna irigačná striekačka [TA] Tek Kullanılmik Üç Parçalı Irrigasyon Enjektörü

[ID] PT. B. Braun Medical Indonesia Jakarta-Indonesia DEPKES RI AKL 20902600243
 [PE] Fabricado por B. Braun Medical AG - Suiza para B. Braun Melsungen AG - Alemania, RS N° DM0061E, Importado por: B. Braun Medical Perú S.A., Av. Separadora Industrial 887 Ate - Lima-Perú, RUC 20377339461, DT. QF. Jacqueline Pilco P.

74125_4613554F_C100_Omnifix-KET.indd 1

17.01.13 14:59

LLDorder 1813

G 121527

Référence interne : PRF_20181112

FR01-M-5-3-03-000-1-G-FR - Grille EUROPHARMAT BBMF

(d'après la mise à jour du 07/05/2010 - EUROPHARMAT - Dossier DM-Grille- 030510.doc)

Seringue OMNIFIX 50 mL embout sonde vésicale


Etiquettes

Conditionnement


B | BRAUN B | BRAUN B | BRAUN B | BRAUN B | BRAUN B |

Omnifix®

50 ml

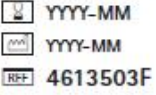

 YYYY-MM
 YYYY-MM
REF 4613503F
STERILE **LOT** Batchno. XXX.
 PZN 00570074

DMV



ID KEMENKES RI AKL 20902600243
 Importado por B. Braun Medical Perú S.A.
 Av. Separadora Industrial 887 Ate - Lima-Perú,
 RUC 20377339461, DE. Of. Jacqueline Pico P.,
 RS. N°DM0061E, Fabricado por B. Braun Medical
 AG - Suiza para B. Braun Melsungen AG - Alemania
 Шприц Омнификс 50(60) мл, без иглы.
 РУ № ФСЗ 2009/05984 от 31.12.2009.

Manufacturing Site / Произведено:
 B. Braun Medical AG, Hauptstrasse 39,
 6182 Escholzmatt, Switzerland


 CE 0123


B BRAUN


B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen
Germany

0813 - 1 72014

Omnifix® **50 ml**

100 0813

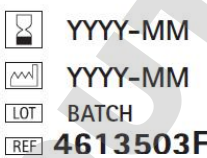
 YYYY-MM
 YYYY-MM
LOT BATCH
REF 4613503F
 100 x PZN 00570074

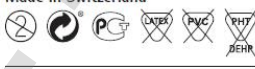
STERILE **CE 0123**
 Made in Switzerland


B BRAUN


B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany


ID KEMENKES RI AKL 20902600243
 PE RS. N°DM0061E
 RU Шприц Омнификс 50(60) мл, без иглы. РУ № ФСЗ 2009/05984 от 31.12.2009.
 Производитель: «Б.Браун Мельзунген АГ», Карл-Браун-Штрассе 1, 34212 Мельзунген, Германия. B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Germany.
 Произведено: «Б.Браун Медикал АГ», Хауптштрассе 39, 6182 Эшольцматт, Швейцария.

Manufacturing Site :
 B. Braun Medical AG, Hauptstrasse 39,
 6182 Escholzmatt, Switzerland
 Made in Switzerland

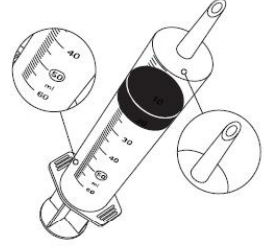

999


 EAN-13


 EAN-128

74125_4613503F_C100_Omnifix-KET.indd 1

02.09.13 14:05

\\Dorder 2165 - G:\newald 131067

\\Dorder 2165 - G:\131044

Format: 67 x 225 mm

Référence interne : PRF_20181112

FR01-M-5-3-03-000-1-G-FR - Grille EUROPHARMAT BBMF

(d'après la mise à jour du 07/05/2010 - EUROPHARMAT - Dossier DM-Grille- 030510.doc)