

# pH-Fix 3,1–8,3

## Languettes test pour détermination du pH de la salive entre 3,1 et 8,3



**IVD** Uniquement pour les professionnels de santé

**i** Respecter les instructions d'utilisation

**REF** 92135.FR

### Contenu :

100 languettes test  
1 échelle de couleurs pH 3,1–8,3

### Application :


Les languettes test pH-Fix 3,1–8,3 sont des languettes indicatrices pour la détermination semi-quantitative du pH de la salive.

NB : Les languettes test pH-Fix 3,1–8,3 pour la détermination du pH de la salive doivent être utilisées uniquement par des professionnels de santé. Pour l'interprétation, demander l'avis de spécialistes médicaux.


Pour la vérification des languettes, utiliser des solutions tampons du commerce.

### Mode d'emploi pour la détermination du pH de la salive :

1. Prélever un échantillon de salive et plonger une languette test dans l'échantillon pendant env. 5 secondes.
2. Sortir la languette et la tamponner sur du papier absorbant en la tenant sur la tranche pour éliminer l'excédent d'échantillon.
3. Comparer immédiatement les couleurs des zones réactives avec l'échelle de couleurs. Lire la valeur et noter celle qui se rapproche le plus de la coloration des zones réactives. L'évaluation n'est possible que pendant une période limitée, car l'intensité des couleurs des zones réactives change encore (précision de lecture :  $\pm 0,2$  unité de pH).

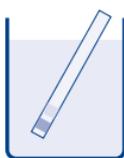

1

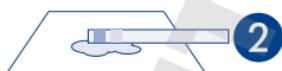

2



3

### Performances :

Une étude comparative (n = 50) a mis en évidence un écart moyen de 0,12 unité de pH entre les languettes test et la méthode de référence (électrode de pH).

### Conditions de conservation :

Conserver les languettes test à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité. Conserver la boîte dans un endroit sec et frais (à une température entre 4 et 30 °C).

### Élimination :

Les languettes usagées peuvent contenir des matières infectieuses. Les éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur concernant l'élimination des déchets.



Déclaration de conformité (le produit est conforme à la directive européenne 98/79/CE sur le diagnostic in vitro)



Diagnostic *in vitro*



Respecter les instructions d'utilisation



Limites de température



À utiliser avant



Numéro de lot



Référence produit



Fabricant



Ne pas réutiliser

**MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG** · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Allemagne  
Tel.: +49 24 21 969-0 · Fax: +49 24 21 969-199 · info@mn-net.com · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)



Commercialisé en France par : **MACHEREY-NAGEL SARL à associé unique**

1, rue Gutenberg · 67722 Hoerd · France · Tél : 03 88 68 22 68 · Fax : 03 88 51 76 88 · sales-fr@mn-net.com

Commercialisé en Suisse par : **MACHEREY-NAGEL AG** · Hirsackerstr. 7 · 4702 Oensingen · Suisse

Tel.: 062 388 55 00 · Fax: 062 388 55 05 · sales-ch@mn-net.com