

# pH-Fix 4,5 – 10,0 PT

## Languettes test pour détermination du pH entre 4,5 et 10,0



Respecter les instructions d'utilisation

**REF** 92121.FR

### Contenu :

100 languettes test  
1 échelle de couleurs pH 4,5 – 10,0

### Application :

Les languettes test pH-Fix 4,5 – 10,0 PT sont des languettes indicatrices pour déterminations semi-quantitatives du pH qui peuvent être utilisées pour de nombreuses applications.

Pour la vérification des languettes, utiliser des solutions tampons du commerce.

### Mode d'emploi :

1. Plonger une languette dans l'échantillon pendant 1 seconde en veillant à ce que toutes les zones réactives soient recouvertes.
2. Sortir la languette et la secouer pour éliminer l'excès d'échantillon.
3. Comparer les couleurs des zones réactives avec l'échelle de couleurs. Lire la valeur.



### NB :

Si la solution n'est pas suffisamment tamponnée, laisser la languette dans l'échantillon et attendre que les couleurs se soient stabilisées.

### Conditions de conservation :

Conserver les languettes test à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité. Conserver la boîte dans un endroit sec et frais (à une température entre 4 et 30 °C).

### Élimination :

Les languettes usagées peuvent être jetées à la poubelle.



Respecter les instructions d'utilisation



Limites de température



À utiliser avant

**LOT**

Numéro de lot

**REF**

Référence produit



Fabricant



Ne pas réutiliser



**MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG** · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Allemagne  
Tél. : + 49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

Commercialisé en France par : **MACHEREY-NAGEL SAS** · 1, rue Gutenberg – BP135 · 67720 Hoerd · France  
Tél. : 03 88 68 22 68 · sales-fr@mn-net.com

MACHEREY-NAGEL SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 186600 €  
Siret 379 859 531 00020 · RCS Strasbourg B379859531 · N° intracommunautaire FR04 379 859 531

Commercialisé en Suisse par : **MACHEREY-NAGEL AG** · Hirsackerstr. 7 · 4702 Oensingen · Suisse  
Tél. : 062 388 55 00 · sales-ch@mn-net.com

# pH-Fix 4,5 – 10,0 PT

## Languettes test pour détermination du pH du suc gastrique entre 4,5 et 10,0



**IVD** Uniquement pour les professionnels de santé

**i** Respecter les instructions d'utilisation

**REF** 92121.FR

### Contenu :

100 languettes test  
1 échelle de couleurs pH 4,5 – 10,0

### Application :


Les languettes test pH-Fix 4,5 – 10,0 PT sont des languettes indicatrices pour la détermination semi-quantitative du pH du suc gastrique.

NB : Les languettes test pH-Fix 4,5 – 10,0 PT pour la détermination du pH du suc gastrique doivent être utilisées uniquement par des professionnels de santé. Pour l'interprétation, demander l'avis de spécialistes médicaux.

Pour la vérification des languettes, utiliser des solutions tampons du commerce.

### Mode d'emploi pour la détermination du pH du suc gastrique :

1. Recueillir l'échantillon dans un récipient propre. Plonger une languette dans l'échantillon en veillant à ce que toutes les zones réactives soient recouvertes et attendre que les couleurs se soient stabilisées.
2. Sortir la languette et la tamponner sur du papier absorbant en la tenant sur la tranche pour éliminer l'excédent d'échantillon.
3. Comparer les couleurs des zones réactives avec l'échelle de couleurs et lire la valeur du pH (précision de lecture :  $\pm 0,2$  unité de pH).

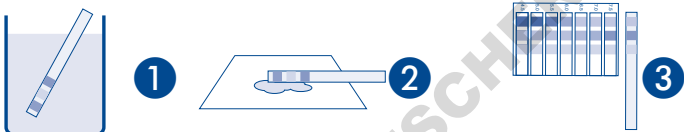

### Performances :

Une étude comparative (n = 390) a mis en évidence un écart moyen de 0,09 unité de pH entre les languettes test et la méthode de référence (électrode de pH).

### Conditions de conservation :

Conserver les languettes test à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité. Conserver la boîte dans un endroit sec et frais (à une température entre 4 et 30 °C).

### Élimination :

Les languettes usagées peuvent contenir des matières infectieuses. Les éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur concernant l'élimination des déchets.



Déclaration de conformité (le produit est conforme à la directive européenne 98/79/CE sur le diagnostic in vitro)



Diagnostic *in vitro*



Respecter les instructions d'utilisation



Limites de température



À utiliser avant



Numéro de lot



Référence produit



Fabricant



Ne pas réutiliser



**MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG** · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Allemagne  
Tél. : + 49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

Commercialisé en France par : **MACHEREY-NAGEL SAS** · 1, rue Gutenberg – BP135 · 67720 Hoerdt · France  
Tél. : 03 88 68 22 68 · sales-fr@mn-net.com

MACHEREY-NAGEL SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 186600 €  
Siret 379 859 531 00020 · RCS Strasbourg B379859531 · N° intracommunautaire FR04 379 859 531

Commercialisé en Suisse par : **MACHEREY-NAGEL AG** · Hirsackerstr. 7 · 4702 Oensingen · Suisse  
Tél. : 062 388 55 00 · sales-ch@mn-net.com