



PHAGO'SPORE

Nettoyant désinfectant sporicide
pour les sols et les surfaces hautes,
et les surfaces des dispositifs médicaux non invasifs



Points forts

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Bactéricide, fongicide, virucide et sporicide (actif en 10 minutes sur *C. difficile* et en 5 minutes sur Norovirus)
- ✓ Respect de l'environnement (substance active : acide peracétique)
- ✓ Produit « contact alimentaire »
(conformément à l'arrêté du 8 septembre 1999)

Conditionnements

Présentation	Code	Nombre d'unité par carton
Flacon de 750 ml	65003	6 unités
Bidon de 5 litres	65007	2 unités



CHRISTEYS
MEDICAL HYGIENE

phagogène®

Christeys France — Division Santé
31, rue de la Maladrerie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 7 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73
www.phagogene.fr



PHAGO'SPORE

Domaine d'application

- ✓ Le **PHAGO'SPORE** est un produit détergent désinfectant pour toutes surfaces, incluant les surfaces des dispositifs médicaux non invasifs.
- ✓ Le **PHAGO'SPORE** peut être utilisé, avec rinçage sur les surfaces pouvant se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires (conformément à l'arrêté du 8 septembre 1999).
- ✓ Le **PHAGO'SPORE** est formulé à partir d'une substance active (acide peracétique) garantissant une efficacité microbiologique à large spectre tout en assurant un respect de l'environnement par sa biodégradabilité en acide acétique, oxygène et eau.
- ✓ Le **PHAGO'SPORE** a une tête de pulvérisateur mousse dense permettant d'éviter la formation d'aérosol et de protéger l'utilisateur.

Composition

- ✓ Actif désinfectant :
 - acide peracétique (N° CAS 79-21-0 ; 0,034% m/m)
 - Peroxyde d'hydrogène (N° CAS 7722-84-1 ; 3,26% m/m)
- ✓ Parfum

Caractéristiques organoleptiques et physicochimiques

- ✓ Aspect : liquide
- ✓ Couleur : incolore
- ✓ Parfum : menthe
- ✓ pH pur à 20°C : 2,00
- ✓ Masse volumique à 20°C : 1,000 – 1,020 g/cm³

Mode d'emploi

- ✓ Le **PHAGO'SPORE** est prêt à l'emploi.
- ✓ Le **PHAGO'SPORE** peut être utilisé pour la désinfection des sols en suivant le protocole des bandeaux d'imprégnation (1L pour 5 bandeaux)
- ✓ Pulvériser sur un linge à usage unique et/ou appliquer sur la surface à désinfecter. Ne pas rincer*
- ✓ Laisser agir 5 minutes pour une activité bactéricide ou 15 minutes pour un spectre complet.

* Dans le cas de désinfection de surfaces pouvant entrer en contact direct avec les denrées alimentaires, un rinçage à l'eau potable est nécessaire (arrêté du 8 septembre 1999)

Utiliser les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Recommandations

- ✓ Utiliser des gants et un vêtement de protection approprié
- ✓ Eviter de faire ruisseler le produit.
- ✓ Péremption: 18 mois à partir de la date de fabrication.
- ✓ Au contact de l'air, dans un récipient ouvert (seau, bac...), le produit est stable 3 jours.
- ✓ La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com

Activité antimicrobienne

Normes	Concentration	Temps
BACTERICIDE		
EN 1276 cond. saleté (<i>P.aeruginosa</i> et <i>E.hirae</i>)	80%	1 min.
EN 13697 cond. saleté (<i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.coli</i> et <i>E.hirae</i>)	10 %	5 min.
EN 13727 cond. saleté (<i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> et <i>E.hirae</i>)	8 %	5 min.
FONGICIDE		
EN 13697 cond. saleté (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	100 %	15 min.
EN 1650 cond. saleté (<i>Aspergillus</i>)	80 %	15min.
VIRUCIDE		
prEN 14476 : 2011 cond. saleté (Poliovirus type 1)	100 %	15 min.
prEN 14476 : 2011 cond. saleté (Adenovirus type 5)	100 %	5 min.
prEN 14476 : 2011 cond. saleté (Norovirus murin)	100 %	5 min.
SPORICIDE		
EN 13704 cond. propreté (<i>C. difficile</i>)	100 %	10 min.
EN 13704 cond. propreté (<i>B. subtilis</i>)	80 %	15 min.
EN 13697 cond. saleté (<i>C. difficile</i> , forme sporulée)	50 %	15 min.



CHRISTEYNS
MEDICAL HYGIENE

phagogene®

Christeys France – Division Santé
31, rue de la Maladrerie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73
www.phagogene.fr

02/2017