

Nettoyant désinfectant sporicide pour les surfaces



PORT D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION LORS DE L'UTILISATION :

- GANTS À USAGE UNIQUE
- VÊTEMENT INDIVIDUEL DE PROTECTION

1

Réaliser une rotation d'un quart de tour afin de mettre la buse verrouillable en position spray 

2

Désinfection des surfaces hautes et du matériel

- Diffuser la solution uniformément sur un non tissé propre et sec.
- Appliquer sur les surfaces hautes du haut vers le bas
- Laisser sécher en respectant le temps de contact :
 - ✓ **5 minutes** pour une activité bactéricide
 - ✓ **10 minutes** pour une activité sur *C. difficile*
 - ✓ **15 minutes** pour un spectre complet (bactéricide, fongicide, virucide et sporicide)
- Ne pas rincer, excepté sur les surfaces alimentaires

3

Changer de non tissé entre chaque zone

4

En fin de nettoyage et pour le transport, réaliser une rotation d'un quart de tour afin de mettre la buse verrouillable en position stop

STOP



10 min.



Actif sur
Clostridium difficile